

Röhrchen Kurzanleitung:



Serum: klinische Chemie, Immunologie, Tumormarker,...
Zentrifuge: 10 Min bei ca. 3000 Umdrehungen.



Blutbild: Blutbild, Thrombozyten, HbA1c.
Nicht zentrifugieren!



Blutzucker
(graue Kappe)



Blutsenkung / BSG
Nicht zentrifugieren!



Lithium-Heparin: für Vitamin C, Na⁺ und K⁺ im Vollblut



Harn



Gerinnung / Citrat: Quick, aPTT, TZ und Fibrinogen
Möglichst rascher Transport ins Labor -
ansonsten zentrifugieren: 10 Min bei ca. 3000
Umdrehungen und vom Blutkuchen abheben.

Stabilität: Die Proben bei ca. +4 bis +8 C° im Kühlschrank lagern.
Möglichst rascher Transport ins Labor.